

安徽省医疗影像云

影像远程诊疗平台

用户手册

安徽影联云享医疗科技有限公司 发布



Ų.	安徽景	影联云享	医疗科技有限公司	٦ آ					
安徽影联云享 公司	医疗科	技有限	编号 :		版本号:				
标题	安徽	省医疗景	」 《像云影像远程诊疗平	平台用户手册 共 41 页					
版本	章 节	页码	修改日期	修改内容					
	1	I		个人中心: 个 字段"工作单	人信息页面增加 位";				
个人中心、			2018-10-12	远程诊疗:影 增加浏览影(钮;	像 会 诊 业 务 列 表 象 和 书 写 报 告 按				
远程诊疗				远程诊疗:科 部位拆分功能	室申请列表增加 ;				
				远程诊疗: 个 功能优化;	远程诊疗: 个人业务记录翻页 功能优化;				
			2018-10-31	在远程诊疗模 诊断功能;	块下增加 AI 智能				
2.0.0			2019-03-14	 整体架构重构内容: 前台:个人中个人模板、科息中心);团队团队列表、团审核);远程诊务、AI自动报后台:人员管角色管理);书生审核、申请审核);专家管 	 , 2.0.0版本上线 心(个人信息、 室申请列表、消 管理(我的团队、 队工作量、人员 断(影像会诊业 告、AI 辅助诊断) 理(人员列表、 Q限审核(会诊医 医生审核、团队 管理(签名管理); 				



目 录

前	言		
注	册、登录	录页面:	4
1、	个人中	ı،ن	6
	1.1、	个人信息	6
	1.2	个人模板	
	1.3	个人消息中心	
	1.4、	科室申请列表	14
	1.5	个人收藏	16
2、	团队	管理	16
	2.1	我的团队	17
	2.2	团队列表	
	2.3	人员审核	
	2.4	团队工作量	
3,	远程i	诊疗	
	3.1、	影像会诊业务	
	3.2	个人业务记录	
	3.3、	AI 智能诊断	
	3.4	AI 智能报告	27
4、	健康	档案	
	4.1、	上传文件	
	4.2	我的数据	
	4.3	档案管理	

前言

感谢您选用安徽影联云享医疗科技有限公司为您精心设计的影联网软 件。

安徽影联云享医疗科技有限公司(简称影联科技)是由中国科学技术大 学校友发起成立的一家以大数据为基础的"互联网+医疗"高科技公司,隶 属于中国科学技术大学先进技术研究院,注册在合肥市高新技术开发区创新 产业园,为影联网的后台服务商,致力于为影像医师及相关临床医师提供专 业的学术交流、继续教育、技能培训、医疗影像远程会诊的平台服务,并将 努力打造全民个人健康档案服务平台。

感谢您使用本公司产品——影联网本产品旨在为包括影像医师在内的 广大临床医师提供医学影像及其相关服务,为广大患者提供力所能及的帮助,进而为全体民众提供方便快捷的健康医疗服务。 **U**安徽影联云享医疗科技有限公司

系统概述:

影像远程医疗平台是基于云技术的医学影像在线阅片和远程诊断报告 平台,打破时间与空间的限制,将优质医疗资源延伸至每一个角落。

基层乡镇或社区医院可以把所有的影像检查上传至远程医疗平台,由县 域影像中心的专业影像诊断医生进行在线阅片并书写检查报告,重点解决基 层医院没有专业影像诊断医师书写报告或由不具有专业影像诊断医生书写 报告的非法执业问题;县级及县级以上医院可以通过影像云平台提交疑难复 杂病例上传至远程医疗平台,由省级会诊团队进行在线阅片并书写审核报 告,有利于帮助医疗资源相对较弱的县、市级医院提升整体业务水平。

本软件支持运行在:

IOS 设备: IOS7 或更高版本, GPU: PowerVR G6430, 运行内存: 1GB 及以上, 并安装微信软件;

安卓设备: Android 4.2 或更高版本, CPU: Nvidia Tegra4、四核, GPU: GeForce, 运行内存: 2GB 及以上, 并安装微信软件;

服务器: Windows Server 2012 R2 Datacenter/Windows 7 Professional/Windows XP 系统、SQL Server 2008 R2 RTM 数据库软件。

注册、登录页面:

新用户点击"还未有账号,立即注册"的按钮即可进入注册页面



	t			
State All	会员登录	扫码登录		
	🚢 wmy0907		~ 1.2	
安徽省影像云				
Anhui Medical Image Cloud Consultation Platform	Q _e 请输入验证码	获取短信验证码		
远程医疗平台	Ĩ	録		
	还未有账	号,立即注册		
		忘记密码		
	为了您使用的流畅性,	推荐使用谷歌浏览器		

在注册页面输入信息有用户名、手机号、获取验证码、密码、确认密码 还有查看影联网用户协议,之后点击【注册】按钮,成为影联网新用户

在约	能注册			×		
	用户名:	请输入用户名		ž	日码登录	
	手机号:	请输入手机号				
な省	验证码:	请输入验证码	获取验证码			
al Image Clo	密码:	请输入密码			获取验证码	
程医	确定密码:	请输入确认密码		录		
	回阅读	并接受《影联网用户协议》(《用户信息保护协议》	,立即注意	99	
				A1.00	忘记密码	

打开浏览器输入网址,进入远程会诊/诊断平台的登录界面

http://www.imagingunion.com/iunet/index.jsp

输入用户名、密码以及验证码即可登录系统



		1		
Charles and the	会员登录	扫码登录	-	
	🌲 wmy0907			
安徽省影像云				
Anhui Medical Image Cloud Consultation Platform	Q、请输入验证码	获取验证码		
远程医疗平台	3	録		
	还未有账	青,立即注册		
		忘记密码		
	为了您使用的流畅性,	推荐使用谷歌浏览器		

1、个人中心

1.1、个人信息

【使用对象】

普通用户、申请医生、会诊医生

1.1.1 界面截图

認 安徽省卫生和计划生育委员会 し::::::::											🤵 缩树子,666777	P	🕞 退出登录	倄 返回首页
个人中心 ✓ 个人信息	^	人中心	密码修改	体好设计	t.									
健康档案 >						提	示:只有完善身份证则	服片和医师资格证	目审核通过才能用	请创建和加入医生国	8队!			
							上传/修改图像							\$X.
			用户名: 🤅	566777										
			* 姓名:	考输入真实的	括									
			* 性别: 〇	男 🧿)女									
		* 1	[作地点:	请选择省份		۲	请选择城市	٠	请选择区/县					
			手机号: 1	L81****422	7					爆放手机号			扫描二纤绑定微(推 码 言 号
			Email :	唐翰入Emai										
		19	医生权限; 💷	申请医生〔	会诊医生 ⑦									
										19-2				
											•			



● 安徽省卫生和计划生育委员会 ● ###### ピナパミュ □*########										🔵 66677	, p	🗭 退出登录	倄 返回首页
个人中心 ✓ 个人信息	个人中心	度码修改	偏经设置										
健康档案				1.	身份验证		2.重置登录密码	>	3.完成				
					ſ	1010000000							
						161~~~4227 请输入验证码		研究验证的					
					I		桃油						
192168.1.145:9001/junet/user/tol/ser#	ame												

				🧑 物牙,666777 🔎 🕞 退出	遵录 倄 返回首页
小人中心 🗸	小人中心 密码修改	候好设置			
小人信息 健康指案 、	偏好设置(图像列表将根据您的	的偏好显示)			
	〇 ALL(查看所有类型图像,如只查看	·偏好怪(像请取)尚勾选)			
	Ост	□ MR	C CR	O DM	
	O DS	O DX	⊖ es	OP	
	O MG	O NM	Оот	O RF	
	O TG	O US	○ XA	⊖ XF	
	O DR		_		
			保存		

1.1.2 功能概述

该模块展示了用户的基本信息、提供修改功能,以及微信绑定功能。

展示用户信息包括:用户名、昵称、姓名、性别、职业、工作地点、 工作单位、手机号、Email、头像、身份证正面图片、身份证反面图片、 医师资格证图片、医师签名图片等。

修改个人信息:除以上展示的用户名不可修改外,其他展示信息均可修改。

微信绑定:手机微信扫描二维码,绑定账号。

提示:只有完善身份证照片和医师资格证且审核通过才能申请创建 和加入医生团队!

申请医生: 普通用户如果想成为医生用户需要在个人信息里选择



☑申请医生进行申请,需要填写自己的工作单位,上传身份证正反面信息,如下图所示,然后点击【提交】按钮,提交之后【提交】的状态变为【审核中】,等待后台管理人员审核之后才能成为医生用户;

会員支援省卫生和计划生育委员会 し ピオポミュ いいごのの話 じ								👩 御子,666777	ø	退出登录	倄 返回首页
小人中心 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				119/184-Applex							
个人信息	用户名:	666777									
健康档案 >	* 姓名:	请输入真实姓名									
	* 性别:	○男 ●女									
	* 工作地点:	请选择省份	*	请选择城市	•	请选择区/县	٣				
	手机号:	181****4227				1923	注机是			Fei 3780622	500.m
	Email :	请输入Email									
	医生权限:	☑申请医生 □会	医生 ②								
		* 工作单位:	请选择			-					
		* 身份证正面:									
										扫描二:	维码
										THE ALL THE	
			上传图像								
		* 身份证反面:									
			上传图像								
							提交				
※ 安裁省卫生和计划生育委员会 し ************************************								() 1997 , 666777	ø	送出登录	倄 返回首页
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○								(1) 指数子, 666777	ø	记出登录	餐 返回首页
 第3第第三条市计划生育委員会 U::::::: 学生性を当 **ilitizan i; 介人中心 、 介人信息 	今人中心 密码核改	偏好设置						(क्र) १३७२ , 666777	ø	退出登录	《 返回首页
 第第第三支部計划支票委員会 Ummin: 伊生地谷 「「「「」」」 小人住宅 介人住宅 就業治業 5 	令人争心 密码機改	偏好設置	援	示:只有完善身份证	親片和医师资档证目	日本統通过才能申請创	建和如入医生团队!	(1987 , 666777 1987 , 666777	<i>•</i>	▶ 退出登录	
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	↑人中O 章術構成	儀好殺責	擅	·示:只有完善身份证	限片和医师资格证目	日田 市 続通 江 才 能申 時 创 む	她和如人医生同队。	grave and the second	<i>•</i>	 退出登录 	
 ※ ###128/HMAR#### UUMME # 1455 **********************************	↑人中心 ==前緒33	峨行设置	18	示:只有完善券份证 (1) (1) 上传/称文团像	現片和医师废情证目	3年校通过才能申请创	建和加入医生同队 5		<i>•</i>		
 ※第第第2条件HASTBAGE Ummer V1445 ***********************************	▲ 今人中心 奈祝桃女 ● 御殿石 :	@###Q置 666777	18	示:只有完善身份证 () () () () () () () () () () () () ()	濑 片和医师资格证目	1.筆板通过才照申請創	建和加入医生同队系	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	~	► 2000	
 ※第第第2条件HASTBAGE Ummer V1445 ***********************************	介人中心 奈沢桃文 用户名: * 姓名:	4865%2重 666777 時後入真家姓名	18	示:只有完善券位证 () () 上传/#32图像	限片和医师资格证目	1.审权通过才能申请创	建和加入医生同队 \$	S\$F,666777	~		
 第第第12年1月14年19月6日 しば時間、学生2453 ***00008 日 へんから ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	介人中心 奈沢桃女 用户名: * 姓名: * 世名:	 666777 済後入真気姓名 ○男 ●文 	18	示:只有完善身份证 ()))))))))))))))))))	限片和医师资格证目	1. 田板通过才期申请创	建和加入医生同队 1	S\$F,666777	<i>•</i>		
 第第第12年1月14年19月6日 	介人中心 奈秋林女 用户名: * 姓名: * 世部: * 工作地表:	(4572)3 6667777 時後入夏支付名 ○男 ●女 靖法探報份	38	示:只有完善身份证 使命 上传/独议国体 美达择地市	调 阱和医师废储证到	▲ 無級通过才期申請創計 申応提区/員	建和30入医主同队 1	S\$7,666777	~		
 ※第第第3条/HASTSAGE UIIIIII (*1455 **2003) G 小人中〇 ~ 小人市〇 ~ 小人市〇 ~ 小人市〇 ~ 小人市〇 ~ 小人市〇 ~ 	介人中心 奈秋林公 用中名: * 吐名: * 吐名: * 吐名: * 工作地点: 手印号:	 (655777 (月本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日	35 •	示:只有完善身份证 下: 上传/独议团体))))))))))))	- 湯片和医何素格在1 -	■筆板通过才順申請创 開造課区/員 修設課	建和加入医生团队, 学们会	S\$7,666777	<i>•</i>		★ 200 ± 0
 ※第第第3条件MARSAGE UIIIIII (*1455 **100205 G 小人中〇 ~ 小人田田 秋田田 (*128) (*128)<th>↑人中心 奈碗桃女 用中名: * 姓名: * 世部: * 工作地点: 手印号: End号:</th><th>(405742)置 6666777 第日本目表現法名 ○男 ●女 第点提案報告 181****4.227 MREL****55/MIR/RE</th><th>15 </th><th>示:只有完善身份证</th><th>- 湯片和医何素格在1 - ・</th><th>■筆板通过才期申請创 例选择区/員 体契</th><th>建和加入医生团队, 学们是</th><th>(Soft, 666777</th><th>•</th><th> ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ●</th><th>★ 返回進页</th>	↑人中心 奈碗桃女 用中名: * 姓名: * 世部: * 工作地点: 手印号: End号:	(405742)置 6666777 第日本目表現法名 ○男 ●女 第点提案報告 181****4.227 MREL****55/MIR/RE	15 	示:只有完善身份证	- 湯片和医何素格在1 - ・	■筆板通过才期申請创 例选择区/員 体契	建和加入医生团队, 学们是	(Soft, 666777	•	 ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ●	★ 返回進页
 ※第第第1年前月4日第月4日 U1111日、ダイエム5 ***2023年 小人中〇 ・ 小人用〇 小人用〇 (1)111日、(1)111日、(1)111日、(1)111日、(1)111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)111日、(1)111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)111日、(1)111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)1111日、(1)11111日、(1)11111111日、(1)111111日、(1)1111111111	介人中心 奈碗桃xx 用户名: * 姓名: * 七田: * 王円地希: 手印号: End: End: ※ 全田: 第 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	(株分会置) 6666777 (株)長山長大学名 (株)長大学名 (株)長大学名 (株)長大学名 (株)長大学名 (株)長小学名 (株)長小子名 (株)長小子名 (株)長小子名 (株)長小子名 <p< th=""><th>指 55、可查查4.15回户中课 56、可加入会中国队,进 55至一①</th><th>示:只有完善身份证</th><th>湯片和医何素相至〕</th><th>■筆板通过才期申請创 第选择区/員 ————————————————————————————————————</th><th>筆和加入医生回気。 第 940章</th><th>(\$\$7,666777 1</th><th>•</th><th> ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ●</th><th>★ 返回進页</th></p<>	指 55、可查查4.15回户中课 56、可加入会中国队,进 55至一①	示:只有完善身份证	湯片和医何素相至〕	■筆板通过才期申請创 第选择区/員 ————————————————————————————————————	筆和加入医生回気。 第 940章	(\$\$7,666777 1	•	 ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ●	★ 返回進页
※第第第第第第第第第第第第 UIIIIII (*1455 **********************************	↑人中心 部初感気 用中名: * 吐名: * 吐名: * 吐名: * 吐名: * 吐名: * 正作地点: 手印号: Email <th>(405742)置 6666777 第日本目表現法名 ○男 ●女 第日本目表現法名 第日本目本目表現法名 第日本目本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目前 ●の第日本目前</th> <th>括 - 百州香本社藝的神神 - 元 - 元 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二</th> <th>示:只有完善身份证</th> <th>潮片和医药煮糯亚豆</th> <th>■無級通过才期申請创 第25月25/員 482</th> <th>建和加入医生团队, 学们会</th> <th>S\$7,666777</th> <th>•</th> <th> ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</th> <th> ▲ 辺田油页 ● ●</th>	(405742)置 6666777 第日本目表現法名 ○男 ●女 第日本目表現法名 第日本目本目表現法名 第日本目本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目表現法名 ●の第日本目前 ●の第日本目前	括 - 百州香本社藝的神神 - 元 - 元 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二	示:只有完善身份证	潮片和医药煮糯亚豆	■無級通过才期申請创 第25月25/員 482	建和加入医生团队, 学们会	S\$7,666777	•	 ● 退出短来 ● 退出短来 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ▲ 辺田油页 ● ●
○ APRIALATIANA UINNA V1455 ***********************************	介人中心 奈奈桃女 用户名: - * 姓名: - * 世紀: - * 工作地希: - 近日の希: - 変比の規定 - 第46号: - 近日の希: - 第46号: - 1 - 1 - 1 - 1 -	(405742)重 6666777 所能入真先结名 ○男 ④女 第11****4227 所能注意:(約15)和14227 第11****4227 第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の第二年の	括 	示:只有完善身份证	湯汁和医何煮橘至〕	■筆級通过才期申請创 例必须区/員 ● ● ●	建和加入医生回风, 学机员	897,666777	•	● 退出短来	★ 返回進页
	↑人中心 奈秋林文 用中名: * 吐名: * 吐名: * 吐得: * 工作地点: 手印息: Ena ● 2 医主权限:	 (8074公園 6666777 第日本日本大学会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	括 	示:只有完善身份证 (所) 上传//安文団体	潮片和医师遗情症日	3.申続通过才期申請创 第25.902/員 492 ・	建和加入医生团队 f	S\$7,666777	P	● 退出短来	★ 返回進页
○ APRIAL ALMAN BAC UTHER V1455 ***********************************	个人中心 部初続ない 用户名: * * 姓名: * * 世日: * * 工作地希: 手印号: Email 王田市 変更正の思惑: *	(40)子公園 6660777 所指入真先送ろ ○男 ④女 第二百年世纪 ●女 ●月間三日、一部 ●月間三日、一部 ●月間三日、一部 ●月間三日、一部 ●月間三日、一部 ●月間三日、一部	括 二 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	示:只有完善身份证 ())))))))))))))	湯片和医何素相至〕	■無級通过才期申請创	筆和加入医生回気。 学机会	897,666777	P	● 退出短来	▲ 返回進页

会诊医生:申请会诊医生:普通用户如果想成为会诊医生用户需要在个 人信息里选择 《会诊医生进行申请,需要填写自己的工作单位,上传身份证 正反面信息,医师资格签名,个人照片,个人简介,如下图所示,然后点击 【提交】按钮,提交之后【提交】的状态变为【审核中】,等待后台管理人 员审核之后才能成为会诊医生用户;



en sær ventigen li			🧑 1807 , 666777 🛛 🧔	🕩 退出登录 🛛 倄 返回首页
个人中心 → へ人信息	医生权限: □申请医生 单会	後医生 ③		
健康档案	* 工作单位:	请选择 *		
	* 身份设正面:			
	* 身份证反面:			
		上传图像		扫描一维码
	* 医师资格证:			绑 定 微 信 号
		上传// 她改图/像		
	* 医叩瑟名:			
		上传/继改图像		
	* 个人照片:			

消息中心:点击右上角的消息图标按钮进行消息的查看

数 安慰省卫生和计划生育委员会 し		🧝 你好,王振晖 🎤 🕞 退出登录 🔺 返回首页
个人中心 > 团队管理 >	消息中心	全部标志力已成
远程诊断 ~ 彩像会诊业务	合合何代定更通知 2019-03-2018-38-21	【25449】
AI自动报告 AI辅助诊断	集所在的【制运器队】, 副长界做的规则成为审核专家 加入国队中国通知 1956年3月20月24日	[1990]
健康指定 >	會發展主導於第日 2019-03-19-20-44-59	[评例]

修改密码: 该模块提供了用户修改密码功能, 流程分为3个部分: 验证 身份、重置密码、完成。

验证身份:为了保证用户隐私,页面显示了当前用户注册的手机号的前 3 位和后 4 位,点击获取验证码,后台会将验证发送到用户注册时使用的手 机号的手机上,用户输入正确的验证码后,点击下一步。

设置密码: 修改密码要确认新密码。,保存提交成功后提示"保存成功"。完成:密码修改成功,将会在10秒后自动登录。

U	安徽影明	联云	享医疗	疗科技有	有限公	司						
	÷ G								😭 你好,王振晖	P	▶ 退出登录	😭 返回首页
个人中心	~	10230,00247	JBAZYG 開									
个人信息 个人模板	100400	BIBIBIA	Nex1 ocal									
科室申请列表				1.身份验证		2.重置登录密码	\rightarrow	3.完成				
团队管理	>											
健康指案	> >				153****5943							
					调输入验证码		获取验证码					
						相元						

偏好设置: 该模块展示了所有图像类型选择后, 当用户查看图像列表时 将根据用户的偏好显示、功能提供多选、取消全部, 从而让选择变得方便快 捷。

() :::::::				🧝 你好,王振辉 🎤 🕞 退出登	录 🗌 返回首页
个人中心 ✓ 个人信息 个人信息	个人中心 密码條政	编好设置			
科室申请列表	偏好设置(图像列表将根据您的	(偏好显示)			
团队管理	♥ ALL(查看所有类型图像,如只查看	(偏好图像清取消勾选)			
這程诊断	🕑 CT	Ø MR	Ø CR	Ø DM	
健康指案	🕑 DS	Ø DX	🖉 ES	Ø LP	
	👩 MG	👩 NM	Ø OT	Ø RF	
	🕑 TG	🕑 US	Ø XA	🖉 XF	
	🕑 DR				
			tRdy.		

1.2、个人模板

【使用对象】

会诊医生



1.2.1 界面截图

設計支援省卫生和计划生育委員会 し:::::::						😭 1847. :	日叛挥 🔎 🕞 退出登录 倄 返回首页
个人中心 ✓ 个人信息 个人模板	检查模式:	调选择检查模式 • 检查部	位:	· 南名称:	模板名称: 横灰名称		# 100 新型报告表表
科室申请列表	序号	检查模式	检查部位	疾病名称	模板名称	创建时间	操作
团队管理 > 远程诊断 >	1	MR	骨盆	测试数据	测试	2019-03-19 21:01:49	161100 X5100
健康挡棄	2	CT	腹部	123	123	2019-03-19 20:45:22	482X (11)
		唐 2 近门屋 白土 2 近门屋					
	显示第1条1	1萬 2 张记录,总共 2 张记录					

1.2.2 功能概述

为用户增加个人报告模板用于在书写报告和审核报告时使用个人模板 书写报告

列表数据展示如下图所示:展示个人的报告模板,展示内容有序号、检 查模式、检查部位、疾病名称、模板名称、创建时间、操作(修改、删除)

Umm Pifet ourons U						😭 你好,王振辉 🔎	🕞 退出登录 🔗 返回首页
个人中心 → 个人信息 个人模板	₫査模式: jījījī	調检查部位:	调动和适应的 • 疾病名称	: 病病名称	模板名称: 模板名称		新漢报告機版
科室申请列表	序号	检查模式	检查部位	疾病名称	模板名称	创建时间	操作
回队管理 > 远程诊断 、	1	MR	骨盆	测试数据	测试	2019-03-19 21:01:49	修改 删除
健康措施	2	CT	腹部	123	123	2019-03-19 20:45:22	修改 删除
	元元第1条判据 2	新己集,回共 2 新己集					

查询:通过检查模式、检查部位、疾病名称、模板名称、创建时间进行 查询



i sarlerinensa i sarlerinensa	_					😭 (897. 3	调弹 🔎 🕞 退出登录 倄 返回首页
小人申公 ↓ 小人信息 小人復報	检查模式:	·清池绿松查模式 · 检查部	位: 动动移植面部位 • \$	运购名称:	模板名称: 欄扳名称	创建时间: 创建时间	
科室申请列表	序号	检查模式	检查部位	疾病名称	模板名称	创建时间	操作
図以管理 > 远程诊断 >	1	MR	青盆	测试数据	测试	2019-03-19 21:01:49	修改 無能除
健康指案 >	2	СТ	1927 1927	123	123	2019-03-19 20:45:22	修改 删除
	显示第1条	转载 7 张记录,包共 7 张记录					
	313768 1 sR	men z spocer , 1974, 2 spocer					

新增报告模板:点击【新增报告模板】按钮进入新增界面,进行报告模

板的新增	操作							
※第二次の1月25日1月25日 (1月11日、伊生45年3年9年1月25日) 小人信息 小人信息 利生申時列示 (回し2日) 信息を知 > (現象年) 使動(45年)	检查模式:		102: <u>第00時時間第位</u> ・ 第5時 <u> 後面部位</u> 第位 第位 第位	新增报告模板 检查模式: 检查即位: 疾病名称: 检查印象: 检查所见:	96204039607 9620403960 9690516 9680516 4080516 4080560	×	第二日日 第二日日 第二日 第二日日 第二日日 第二日 1149 1149 1522 1149	 ● 退出登録 ● 返回意页 ● 第第届世報版 ● 第第届世報版 ● 第第 日 世報 ● 第 ● 第
	显示语 1 余到屏	\$ 2 新己荣,总共 2 新己荣				Roja (1995)		

修改:点击【修改】按钮进行报告修改操作

•	
	安徽影联云享医疗科技有限公司
世紀 安徽省卫生和计划生	算委员会

 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							8 (505	,王振辉 🔎	🕞 退出登录	倄 返回首页	
个人申込 → 个人信息 个人信息	检查模式:	请选择检查模式 · 检查音	N2: massiansia • 19192	修改报告模板			× USEB10	m e n	新增报告编版		
科室申请列表	序号	检查模式	检查部位	检查模式:	MR	۲			操作		
団队管理 → 1 MR 骨盆	骨盆	检查部位:	骨盆	•	01:49	保改 開始					
过程的新 > 健康档案 >	2	СТ	8028	疾病名称:	別试設備		45:22		1982X #1100		
				模板名称:	测试						
				检查印象:	121						
				检查研究:	212	li					
				takan (777 M							
						取消					
	显示第1条到	第 2 条记录,总共 2 条记录									

删除:点击【删除】按钮,进行对不需要的模板进行删除操作

「「「「「「「」」、 やまれます」 いれたのたま U						\$\$ 1547	,王振辉 📣 🕞 退出登录 🌴 返回首页
个人中心 ✓ 个人信息 个人信息	检查模式:	游游科检查模式 • 检查音	FQ: #115412#542 • \$494	提示		×	
科室申请列表	序号	检查模式	检查部位	确定要删除吗?			操作
図以管理 >	1	MR	骨盆			· 建油 01:49	修改 制除
健康档案	2	ст	8625	123	123	2019-03-19 20:45:22	修改 删除
	显示第1条孔	19월 2 왕(元왕 , 우부 2 왕(元왕					

1.3、个人消息中心

【使用对象】

普通用户、申请医生、会诊医生



1.3.1 界面截图

		🧑 你好,王服將 🤌 🕞 退出登录 🔗 返回首页
小人中心 > 团队管理 > 远程诊断 >	消息中心 回注305年10月1日 10月11日	全部标识为已成 (评估)
健康指定 ~ 松溪管理 上传文件	2019-0-61 12:28:51 (FRA.0851) 2019-0-61 12:28:59 @RE203.infs:081]	[1990] [1990]
POINTING .	2019-0-0-0 09.22.17 创建EEEL版和问题[1] 2019-0-01 09.22.11	(SPP)) rows
	にかたしかいがい「私に知っ」 2019年4年(1923)55 1016人間知 2019-03-2013.5335	1.07014 【評問】
	(国际)送知 	【評例】 【評問】
	102人(103人)-1012(1011) 2019-03-2019-23-459 102人(205人)-1012-03-01 1012-1012(1011-03-01)	【評批】
	2017年7月1日1444 显示第1条列第10前记录,总共13条记录 每页显示 10 - 第记录	

1.3.2 功能概述

该模块展示了当前用户的消息通知功能,模块分为未处理、已处理 两个状态。

1.4、 科室申请列表

【使用对象】

申请医生、会诊医生

1.4.1 界面截图

一部で 一部で 一部で 一部で 一部で 一部で 一部で 一部										🍣 你好,影联网集后	<i>P</i> ()	🕞 退出登录	斧 返回首页
个人中心 → 个人信息 个人信息	上传时间: 查询		曽 目标团队	: 全部			• 姓名:		思者编号		检查模式	t :		
◇人政黨 料室申請列表 团队管理 >	尚未报告	尚未审核 民医院 总数:0	已经审核								3100 85 49	IB STATE		48-2036-00
远程诊断 > 健康档案 >	序号	患者 编号	患者姓名	t±3i	年龄	图像数日	模式	检查部位 没有找到匹配的记录		上传时间	检查时间		上传单(2



 ○ 大小心 へ人小心 へ人小心 へ人小心 へ人小心 へ人小心 へ人小心 () 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	上代时间: 前印性: 金郎 小 角球	□ 目标223A: 全型 已经和核 那些就名: 性別 年龄	 ・ 放告: 王三 ・ 放告: 王三 ・ 放告: 五三 ・ 放告: 五三 	原告号 40百万化 2月15日代	 ①57.影联络集合 1.代わり回 	 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	
田安 安康省卫生独康委員会 日 2000年2000 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	目标回队: 全部 車械印何: 前未現首 前未車板 当前医院:天长市人民包括	 是百日打印: 全部 * 查察 已於申條 名 113 44 医体数E 	姓名: 王三 1 株式 約4550 12	原音编号: (松舎が 対応可じまた) (松舎が) (ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ	 (約7. 東取四重日 (約3. 東東) (約3. 東東) (別注意書) (副注意書) 		 (*) (*) 退出登录 (*) 返回首求 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

1.4.2 功能概述

该模块展示主要功能有:

部位拆分功能,针对多部位的影像可以拆分为多条不同部位的病例,选择部位拆分进入部位拆分界面,在该界面可以针对一条数据拆分为多条展示 在列表中,并且每一条数据都可以进行会诊和书写报告;

上传医院的数据浏览功能:在该页面可以查询到当前用户所在医院/科 室在特定时间段上传"影联网"上申请会诊/诊断的数据,能够看到这些数 据所处的状态(尚未报告、尚未审核、已经审核),为进一步的报告打印和 数据统计创造条件;

基本的数据统计功能:在上述的"影联网"医院数据浏览页面,可以显示统计时间段的申请会诊/诊断例数的统计结果。注意:按照什么时间(申请时间/会诊时间)统计应当与绩效系统的统计时间选择为准;默认查询时间为本月月初至查询当天。

打印已审核的会诊报告功能:在上述的"影联网"医院数据浏览页面,

U安徽影联云享医疗科技有限公司

申请会诊/诊断医院的医生用户可以在该页面打印已经审核的报告; 导出详情功能:用户可以导出【已经审核】页面所有的病例数据 修改病史功能:未审核数据支持修改病人病史 生成报告单功能:已审核数据支持报告单重新生成

1.5、 个人收藏

【使用对象】

申请医生、会诊医生

1.5.1 界面截图

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○					🌍 你好,影联网售后	192	🤿 📣	🕞 退出登录 🛛 斧 返回首页
小人中心 小人伯息	患者姓名: 邢亮彬	检查部位:	检查时间:	台				
个人模板 个人 收 應	198 # #1988	电影社会 村	-91 - 6 56	1200+40日 1 月一1	\$A36.08/17	10-#FR-HD	浏览图像	日辺透園像 取用枚載
科並中的外域 図队管理 >	73************************************		200 ×1-864	没有找到匹配的记录	WEINLIG U.	020003143		TIANT
健康档案 >								
EDLA 使用 > 近起368 > 使用458 >				这种和制匠和加己荣				

1.5.2 功能概述

该模块主要用于展示用户从影像会诊业务【尚未报告】【尚未审核】【己 经审核】处收藏的病例

并且有相应的查询功能。当前登录用户可根据患者姓名、检查部位、检 查时间进行专项查询。

列表展示了患者编号、患者姓名、性别、年龄、模式、图像数目、模式、 检查时间、上传单位等患者信息,点击任意一条记录,浏览图像信息,也可 进行【取消收藏】操作

2、团队管理

【使用对象】

会诊医生



1.6、我的团队

我的团队功能模块包含我加入的团队和我创建的团队

我加入的团队,在我加入的团队页面如下所示,如果还没有加入团队, 页面会提示"您还没有加入团队,点击'我要加入团队'"可以申请加入团 队

	Ŭ®₩≅₹							1989 , 1	天梦釈 .	Ð	ų	📑 退出建筑	ñ
个人中心 团队管理		我加入的团队	我创建的团队	接收团队									
我的团队团队列表						您还没有加入团队	(我慶加入团队)						
四程诊断 健康档案													

加入团队之后页面如下所示,显示团队成员情况,可以在选择团队里选择要查看的团队情况,还有【退出团队】【设为默认团队操作】

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				🤤 你好,影响网集后 🧟 🌒 🏟 退出登录 卫 🕯	医回首页
个人中心 > 团队管理 >	我加入的团队 我创建的团队	、 按收团队			
我的团队 团队列表 团队工作量	选择团队: xxq脚试 团队人数:2人				1
人员审核 远程诊断 >	序号 团长 1	团队成员	因队权限 由核专家	工作单位 安徽中医约大学第一附属医院	
健康档案	2	影联网售后	实习专家	天长市人民國族	

我创建的团队,在我创建的团队页面展示团长创建的团队信息

					🌧 你好,影联网售后 🛛 👰	(1) (1) 退出登录 (1) 返回7	首页
					•		
个人中心							
团队管理	我加入的团队	我创建的团队 接收	却队				
我的团队	选择团队 2019年12月	同時拉检查数据・					
团队列表	团队人数:1人				权限管理 转	社团队 展出团队 设为默认团队 ⑦	
团队工作量	a de la companya de la	18 19	团队成员	可以即放	工作单位	联络方式	
人员审核			MIP/04024	PAIN SPART	1174412	4090334	1
远程诊断 >	國大	1	杉联网售后	报告专家	天长市人民医院	178****8209	
健康档案 >							
						E	T

U安徽影联云享医疗科技有限公司

其中的权限管理可以对该团队下的团员进行权限修改,该权限用于会诊 时的权限使用,权限有

> **见习专家:**可浏览图像及已经审核的报告单,不可修改;没有书写、审核报告的 权限;

> **实习专家:**可浏览图像及已经审核的报告单,不可修改;可在尚未报告界面书写 报告但无法保存;没有审核报告的权限;

> **报告专家:**可浏览图像及已经审核的报告单,不可修改;可在尚未报告界面书写 报告:没有审核报告的权限;

> **审核专家:**可浏览图像及已经审核的报告单,不可修改;可在尚未报告界面书写报告;具有审核报告的权限;

								🧑 你好,王振辉
我加入的原 选择团队 测 团队人数:2	团队 我创建 试团队12 • 人		修改权限	真实姓名	董泉祥		×	权限管理
	序号	团队成员		18CX 1XPR	审核专家	•		
团长	1	王振辉				取消	權政	

踢出团队,团长有权限把该团队下的人员踢出团队

会数省卫生健康委员会 ● 555575588 ● 55557588 ● 55557588 ● 55557588 ● 55557588 ● 55557588 ● 5555758 ● 5555758 ● 5555758 ● 555575 ● 55557 ● 555575 ● 555575 ● 555575 ● 55557 ● 555575 ● 55557 ● 55567 ● 55557 ● 5557 ● 5 0 ● 5 0 ● 5 0 ● 5 0 ● 5557 ● 5		क्ल क	,影歌网集后 🧟 🌍 📢 🕞 退出登录 倄 返回首页
个人中心 > 团队管理 >	我加入的团队 我创建的团队 接收团队		
我的团队	选择团队 2019年12月质拉检查数据 •	×	
团队列表 团队工作量	团队人数:1人	是否将该成员踢出团队?	
人员审核	序号 团队	成员 戦会 戦会	联系方式
远程诊断 >	四长 1 影動		178****8209
健康档案			

设为默认团队

○ 安徽省卫生健康委员会 ● 問題語第23篇 ● 問題言第23篇					会 你好,影联网售后	🧶 🍖 🔹 G	退出登录 💣 返回首页
个人中心 > 团队管理 >	我加入的团队	我创建的团队	接收团队				
我的团队团队团队列表	选择团队 测试 一 团队人数:1人	h∉	v		权限管理	i sefferit bernen	izamuzzu 🕐
人员审核	國长	序号 1	國队成員 影联网售后	团队跟称 宙核专家	工作单位	联系方: 178****8	•
辺程珍断 > 健康档室 >							

转让团队:只有团长才有权限转让团队给团队的成员



 田 安徽省卫生健康委员会		😂 697. RAVINAL 🤌 🀬 📢 🕞 BH3	登录 🔺 返回首页
个人中心 >	我加入的团队 我创建的团队 接收团队		
我的团队	选择团队 2019年12月质控检查数据 •	$\mathbf{\Omega}$	
团队列表	团队人数:1人		
人员审核	序号 团队成员	410年最早時回加州目前で19月1日前日間1月1日(1) 取得一個位	
远程诊断 >	1 彩紙図画品	178****8209	
健康信楽			

接收团队:团队转让的被接收人可以选择接收或拒绝接收

1.7、团队列表

包含创建团队和加入团队操作

用户进入创建团队界面,编辑申请创建团队的必要信息,完成之后 点击"提交申请"之后提示"提交成功,请等待审核"。

 						(2) (23)	好,王振辉 🏼 🔎	🕞 退出登录 🛛 🌴 返回首页
个人中心 > 団队管理 > 部の可能	团队名称 洲	的人团队名称查询	所屬地区 调选择		2 27 • 260 (d)	REAL		
团队列表	序号	团队名称	國长	所屬地区	团队类型	创建时间	团队人数	操作
团队工作量	1	-	光头强	浙江省null	-	2019-04-01	0	申请加入
人员审核	2	ceshi0010	光头强	浙江館null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申谢加入
远程诊断 > 健康档案 >	3	ceshi009	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	#Webs>
	4	ceshi008	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019+04-01	0	申诫助四入
	5	ceshi007	光头强	進行工能null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申请加入
	6	ceshi006	光头强	浙江論null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申请加入
	7	ceshi005	光头强	進行工作inull	影像会诊类型	2019-04-01	0	申请加入
	8	ceshi004	光头强	進行工作inull	影像会诊类型	2019-04-01	0	申诫加入
	9	ceshi003	光集强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申诫助以入
	10	ceshi002	光头强	浙江省杭州市上城区	影像会诊类型	2019-04-01	1	申谢加入
	显示第1条到	馬 10 条记录,总共 245	条记录 每页显示 10 • f	Rict R			× 1 2	3 4 5 25 >

用户进入加入团队界面,界面列表显示所有团队,或用户可以根据 搜索找到自己想要加入的团队之后,点击"申请加入",填写信息申请 加入等待审核,提交申请后提示"提交成功,等待团队管理员审核"。

划生育委员会 UNITER REF						🤵 a	好,王振辉 🏼 🔎	🗭 退出登录
<u>،</u>	团队名称 清洁	入团队名称查询	所屬地区 演选择	* 通知择 * 通法择 * 团队类型 全	# • # #	國際的政		
	序号	团队名称	团长	所属地区	团队举型	创建时间	团队人数	191
	1	-	光头强	进行王编hull	-	2019-04-01	0	中海
	2	ceshi0010	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申演
> >	3	ceshi009	光头强	浙江備null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申謝
	4	ceshi008	光头强	浙江備null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申謝
	5	ceshi007	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	⊕at
	6	ceshi006	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	±
	7	ceshi005	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申謝
	8	ceshi004	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	申渊
	9	ceshi003	光头强	浙江省null	影像会诊类型	2019-04-01	0	(#382
	10	ceshi002	光头强	浙江省杭州市上城区	影像会诊类型	2019+04-01	1	中部

申请之后需要团长在【人员审核】模块进行审核操作

1.8、人员审核

用户点击人员审核,将进入人员审核中的未审核展示页,用户可以 在操作一栏进行相关的操作,给与申请人是否通过审核;

安徽省卫生和计划生育委员会 じ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						🧑 你好,王颖辉 🍁 🕞	退出登录 💣 返回首页
个人中心 > 図以管理 ~	申请人」這給入申请人	申请时间	18993年申请时间 1111日				
我的团队 团队列表	未审核	已审核					
团队工作量	序号	申请人	工作单位	手机号	申请团队	申请时间	操作
人员审核				没有找到匹配的记录			
远程诊断 >							
健康档案							

用户点击人员审核中的已审核,将进入已审核的展示页,包括审核 通过和未通过,在操作一栏可以进行申请人信息查看和权限管理。



○ 安徽省卫生健康委员会 ○ SEESTING UNING P					🍣 你好,影联网售后 🛛 👰	🌖 🜓 🕞 退出登	灵 💣 返回首页
个人中心 > 团队管理 >	申请人 hh	申请时间 请选择申请时间					
我的团队 团队列联	木市核 已审核]					
团队工作量	序号 申请人	工作单位	手机号	申请团队	申请时间	状态	操作
人员审核			没有找到	匹配的记录			
远程诊断 > 健康档案 >							
	,						

1.9、团队工作量

人员工作量:页面展示该团队下人员的工作量情况,点击【查看详 情】,查看每个人的工作量详情

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○					🌍 (197 , 影联网售E	: 🖉 🥱	 () () 退出登录 	😭 返回首页
个人中心 、	-							
团队管理	人员工作量	团队会诊量						
我的团队	选择团队: 测试十年	• 医生姓名: 全部	· 报告完成时间: 演选择时间	1 章词	导出 导出洋情			
团队列表								
团队工作最	息例数:0例 初设							
人员审核	序号	医生姓名	初诊例数	审核例数	总例数		操作	
远程诊断 >	1	影联网售后	0	0	0		查看详结	
₩₩₩₩₩₩ > ₩₩₩₩₩₩₩ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	型示第 1 采 到第 1 余	记录,忽共 1 乐记录			会 097,职联网1	tis 🗭 4) () 通出設示	
个人中心	人员工作量	团队会诊量						
团队管理				影联网眚后	^			
我的团队	选择如队: 题试十年	• 医生蛀名: <u>全部</u>			15			
四队列表	总例数:0例 初	诊息数:0例 审核急数:0例	总计:0例					
人员审核	成日	医生性名	序号 上传单位	模式 报告类型	例数		得作	
远程诊断		製紙図集后	1 -	 书写报告 	0 0		111111	
健康档案 >				4+*164			_	
	显示第1条到第1条	记录,总共1条记录	血不用 1 先到馬 2 杀记家,	un 2 micik				

用户点击查看柱状图,则会将列表以柱状图展示,导出数据则将列



表以 excel 格式导出。

安徽省卫生健康委员会					🌍 你好,影联网售后 🏾 🥬	🌍 📢) 🕞 退出登录 🎸	返回首页
个人中心 →	人员工作量	团队会诊量					
	Verty continues a sure	The state of the s					
我的团队	四年间67. 週還十年	* 211	4. 王部 ・ IK日元0K0110: MIX100110		(40) (40)+10		
国家の報告	息例数:0例 初诊:	息数:0例 审核总数:0例					
人员审核	序号	医生姓名	初诊例数	市核例数	总例数	操作	
行四冷艇 .	1	影影照信手	0	0	0	1000000	
健康結案 、	1	#240M #01	0	0	v	LANDY IN	
	■示策1条判断1条问	课,员共1%问题					1
	並70月1条到第1条id	se , sem 1 sector					 ?

团队会诊量:统计团队与关联医院的会诊量,可根据选择团队、上 传单位、检查模式、报告完成时间专项查询,导出数据则将列表以 excel 格式导出。

○ 安徽省卫生健康委员 ● 認識許認識 し NING				🍣 (kyf., R) Ryg 📾 🖉 🌎	📢) 🕞 退出發录 🔗 返回首页
个人中心	人员工作量 团队会诊量				
团队管理	洗择可以、 今年	• 上传单位:	• 於音欄中: 今 期	• 招告完成时间: 通行	Zertini 🧰
团队列表	100 Ett	. Tidenta Tub		- 34CH/04043PS 18500	NG PO
团队工作量					
人员审核	序号 上	传单位	会诊团队	检查模式	会诊数量
远程诊断			没有找到匹配的记录		
ATION					

3、远程诊疗

【使用对象】

会诊医生



3.1、影像会诊业务

3.1.1 尚未报告

										🌍 (5%F , \$KA	美网集后 🤺	۹	 () () 退出登录 	倄 返回首页
个人中心 > 团队管理 > 远程诊断 >	团队选择: 安 查询 清5	截首影像诊断会诊 1	专家团队 ▼ 上	使时间:		E	意思者姓名:	请输入患者姓名	思者编号: 1	新输入编号	上传单位:	请选择	×	
影像会诊业务 AI自动报告 AI辅助诊断	尚未报告	尚未审核	已經审	ξ.							15	司投告 [))(3		(102099)
个人业务记录	序号	患者编号	患者姓名 1	1別 年1	☆ 留像数日	模式		检查部位		上传时间	1	全面时间	上传单	62
健康档案								没有找到匹配的记录						
														Ģ r

3.1.2 尚未审核

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○				会 你好,影联网集后	i 🤌 🌎 🜓 (* 1845	鼓 😤 适回首页
个人中心 > 团队管理 > 远程诊断 >	四队选择: 安徽省影像诊断会诊专家团队 · 查询 清空	· 上传时间:	書 患者姓名: 田	惠者编号: 资给入编号 上作	韩位: 通选择 •	
影像会诊业务 AI自动报告 AI辅助诊断	尚末服告 尚末审核 已	经审核	18-P 1-076-9201	★ 使报告	() () () () () () () () () () () () () (も沙 松潤時間
个人业务记录 健康档案 >		1227 - 4-BY JOINSALL	没有找到匹配的记录	T14A3b3	1000 - 100	
						_

尚未审核---申请转诊



会就省卫生健康委员会 ● 8世盛界家家第 ● 10 101100平		🥪 你好,教教的编辑 🧬 🀬 🜒 🕞 退出登录 🕷 巡回真页
个人中心 > 团队管理 >	20以选择: 製設云原向试团从(仅用于例 +) 上代的问: 査问 満空	影像转诊申请 × 上传单位 测选择 *
如程移動 > 影像会诊业务		州縣号: 1390447
AI自动报告	尚未报告 尚未审核 已经审核	(名称: 邦満王) (第二) (11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(1
个人业务记录	序号 患者编号 患者姓名 性别 年龄 图8	3回从: 大街中位
健康档案 >	1 93050 郑清王 女 36岁 1	9.供以1: 12 2019-1-06 09:50:25 无为景中图图跳
		□ 请阅读并接受《错诊协议》
	显示第1条到第1条记录,总共1条记录	en e

3.1.3 已经审核

安徽省卫生健康委员会 受認認認識 じゅほこま ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	团队选择: 影 查询	联云亭鸡试团队(① 2	7用于例… *	上传时间:) 患者姓名: 0	患者编号:	会 (176 7 , 彩歌) 3407	网生后 🌮 🌏 📢 上传单位: 预选择	
影像会诊业务 AI自动报告 AI辅助诊断	尚未报告	尚未审核 患者編号	已经患者姓名	审核性别	年齡	图像数目	模式	检查部位		上传时间	波陀陶機	: 旧說沈麗像 牧園秀树 上传单位
налах Фина; ,	1	3407	0	男	0%	2	DX	國部后朝位片		2020-9-02 09:29:56	2020-9-02 08:30:34	国家が代表

3.1.4 功能概述

该功能展示了当前登录用户所有的申请会诊记录,包括尚未报告、 尚未审核、已审核。

并且有相应的查询功能。当前登录用户可根据团队、患者姓名、患 者编号进行专项查询。

尚未报告:列表展示了患者编号、患者姓名、性别、年龄、模式、 图像数目、上传日期、检查日期、上传单位等患者信息,点击任意一条

'尚未报告'记录,在右侧分割线处的空白区域会显示患者详情信息。

尚未审核:列表展示了患者编号、患者姓名、性别、年龄、模式、 图像数目、上传日期、检查日期、上传单位等患者信息,点击任意一条



'尚未审核'记录,在右侧分割线处的空白区域会显示患者详情信息。 每条记录并且有相应的操作:申请转诊。

尚未审核一申请转诊:点击"申请转诊",弹出弹框,填写申请转 诊表单(转诊团队、转诊原因),并勾选转诊协议,点击"确定"申请 转诊。点击"取消",关闭弹框。

已经审核:列表展示了患者编号、患者姓名、性别、年龄、模式、 图像数目、上传日期、检查日期、上传单位等患者信息,点击任意一条 '已经审核'记录,在右侧分割线处的空白区域会显示患者详情信息

3.2、个人业务记录

3.2.1 界面截图

> > >	目标团队: 影打 总例数:10143	秋云享测试团队(仅用于 × ▼ 报告时间: 例		前 模式: 全部	▼ 报告类型: 全部	β ▼ 上传单位:	请选择	▼ 置約
21155	序号	所履团队	患者姓名	患者编号	模式	报告类型	报告时间	上传单位
告 ME	9491	影联云享测试团队(仅用于测试)	测试	456	DX	初诊报告	2016-04-08 13:49:00.0	亳州市谯城区双沟镇中心卫生
॰म शिटक्र	9492	影联云亭测试团队(仅用于测试)	测试	456	DX	审核报告	2016-04-08 13:49:00.0	亳州市谯城区双沟镇中心卫生
`	9493	影联云享测试团队(仅用于测试)	DING SHANG HUA	181876	СТ	初诊报告	2016-04-01 09:42:00.0	合肥影联科技有限公司
	9494	影联云寧测试团队(仅用于测试)	DING SHANG HUA	181877	CT	审核报告	2016-03-31 10:11:00.0	无

3.2.2 功能概述

该模块展示了当前用户所有的患者数据信息列表,每条记录展示了 患者编号、姓名、性别、检查模式、图像数、上传时间等信息,并有修 改病例合健康归档相应功能,并有相应的查询的功能,可根据自定义归 类、患者姓名、患者编号等进行专项查询。

修改病列:点击"修改病例"按钮,弹出弹框,可修改自定义归类、 简要病史、临床诊断等病例信息,其他信息(姓名、出生日期、性别、 年龄)仅供展示



3.3、AI 智能诊断

3.3.1 界面截图

····································	RIBRINA RACENCE ALLER	新統第次10位:: bmy123 厶 5 ∠ 60
) 个人中心	ENTERT / I TERMANNIALE : BAALLO : DENT HALLO BAALLO BAALET : DENT HALLO I	
团队管理		
远程诊疗		
AI智能影響		
影像会诊业药	1 CTOMATINA 2018 1 CT 91 2018-10-31111005 2018-04-29 082949 @28 2019 1 CT 91 2018-10-31111005 2018-04-29 082949 @28 2019 1 CT 91 2018-10-31111005 2018-04-29 082949 @28 2019 1 CT 91 2019	
科臺申請列表	2 C10041142 單葉電 女 83 C1 165 2018-10-311113:19 2018-04-29 08:17:29 单次速度C1平扫 经股份回转 入口管理2016	
个人业务记录		
健康档案		
	7 C10031479 BYTWE K 73 C1 91 2010-10-31133230 2010-10-311330324 MOMPHETETER 2288888 AUGUST	
	10 C10041522 WHALL X 20 C1 21 S012-10-21 S012-20 A S012-04-20 09/12/20 WK/Se/WC1+12*** S2569566 A S019/50/24	
1X2 2X1 更多		रदा?3/त: प्राप्त कर कर मध्यक्ष क्रांस्थ्यक क्रा
60 Y 289 Val: 1134		
ie: wang song mei //44		括节属性
T0041197 1500 WL: -500		
		•
255 Y. 23 Val: 6 me: wang song mel 944 CT0041197 N: 350 WL: 35 ICFL OC - 645 SUICE: 6 00		新元和道

3.3.2 功能概述

用于专家看片时,人工智能标记病灶并标注病灶的基本信息 降低影像诊断医生的误诊率、漏诊率

1、在"远程诊疗"下增加一个二级菜单"AI智能诊断";

新建一个讯飞人工智能的会诊团队【AI 智能诊断团队】,为讯飞人 工智能数据在影联网的专属团队;

只有【AI智能诊断团队】能看到"AI智能诊断"这个菜单; 2、该团队所能看到的数据为上传到改团队的数据,且检查模式为:



CT,检查部位为: 胸部 (或者某一些用于表示胸部的检查部位);

3、"AI 智能诊断"页面,类似于影像业务会诊的页面展示,但是 没有尚未会诊、尚未审核、已经审核这三个子菜单的分配,在列表的操 作中只有【AI 智能诊断】按钮,点击该按钮可以跳转到讯飞人工智能 诊断的页面。

3.4、AI 智能报告

用于人工智能辅助诊断并产出影像诊断报告提高影像诊断医生的 诊断效率:

尚未报告页面如下所示

○ 2010年1月1日 「○ 2010年1月1日 ○ 2010年1月1日							会 你好,影联网集后	🧟 🌒	退出登录 4	返回首页
个人中心 > 因队管理 > 远程诊断 >	团队选择: 阜南县人民医院影 直御 清空	像自动化报 > 上传时间	:		善患者姓名 : 请输入患者姓	名	脑入调号 上传算	4位: 清选择	*	
影像会诊业务 AI自动报告 AI辅助诊断	尚未报告 尚未	审核 已经审核							*5#5	刘元图像
个人业务记录	序号 思想	6编号 患者姓名	性别年龄	图像数日	模式 检查	部位	上传时间	检查时间	上传单位	
健康档案 >					没有找到匹置	配的记录				
										P

选择一条数据可以进行报告的书写以及图像浏览



如果有人在操作该条数据将会提示"有人正在操作该病例,请选择其他



病例"

商素服金 配金和金 日本加加 日本加 日本加 日本加 日本加加 日本加加 日本加加 日本加加 日本加 日本加	vù >	团队选择	化报告 * 患者姓名: 词	输入患者姓名		勝者論号 词指之	编号	上传时间:	11 L4	专单位 通送择	*))))))))))))))
10.9 19.9 かかかかや かっかかか たい	± /	尚末报告 尚未审法	s 已经审核								书写报告 浏
■ # # # # # # # # # # # # #	业务	序号 患者	論号 患者姓名	性別	年龄	图像数日	模式	检查部位	上传时间	检查时间	上传单位
自商要廃史 自協未診新 企上传目的 自 体诊记录 副植未希 第元范数 申请会命 第元印刷 第元印刷	5 F	I 50	387 赵秀英	女	78Y	3	DX	胸推正位	2019-04-13 09:09:40	2019-04-13 09:10:52	阜南县田集镇卫生》
財務務備 165/201 申請金珍 165/00/202 市人正在田村市知知明,現在15月10日		▲ 简要病史		■临床	诊断			▲ 上传目	R9	■ 转诊记录	
							有人正在撤	rr 近 病 闲 , 调 法 译 其 他 病	誇		

尚未审核页面如下所示

	🤤 bmy123 🧬 🥀 🌎 🕒 1814 187	倄 返回首页
只小人中心 > の回知管理 >		清空
今 远程诊疗 ✓ 影像会诊业务	尚未由核 已经由核 自然用核 自然用核 自然用 育核期 正在努力地加速感觉中,導明後	25 (1)95868
AI自动报告 AI辅助论版		
个人业务记录		
javas cripta;		

可以对已经书写过该报告的数据进行审核操作,也可以进行图像的浏览





已经审核的数据如下所示

省卫生健康委员会 Ptiled MIURIE II										🍣 bmy123 🧬 🦼	🤌 🕞 退出登录 🏾 檎 返回首页
o > ≞ >	团队选择 拿南县	人民医院DR自动化制	Ra. * Ba dda	: (1886)	、思考性名	思者编号:	谱输入编号		上传时间:	曲 上传单位 词法法学	* 100 潮堂
	尚未报告	尚未审核	已经审核								派但在那份像
芳	序号	患者偏号	患者姓名	性别	年龄	图像数目	模式	检查部位	上传时间	检查时间	上传单位
	1	3878	稿作制	男	73	4	DX	脚部正位	2019-04-15 14:52:46	2019-04-15 14:54:28	車南县赵集镇卫生院
	2	3877	胡巨芳	女	84	2	DX	解部正位	2019-04-15 14:45:34	2019-04-15 14:47:24	車南县赵集镇卫生院
	3	5424	史獻英	女	71	2	DX	床边胸片正位	2019-04-15 14:40:21	2019-04-15 14:42:10	厚商县田集镇卫生院
	4	3876	刘广泛	勇	73	4	DX	解釋正位	2019-04-15 11:02:31	2019-04-15 11:03:35	厚商县赵集镇卫生院
	5	19155	朱子献	男	74	2	DX	胸郡正位	2019-04-15 11:15:40	2019-04-15 11:17:43	單處長朱囊積中心卫生院
	6	3875	附洪芳	女	62	6	DX	胸郡正位	2019-04-15 11:02:30	2019-04-15 11:03:13	厚地县赵集镇卫生院
	7	19130	曹玉娥	女	56	з	DX	腰椎正位	2019-04-15 08:46:56	2019-04-15 08:48:51	單處畏朱囊積中心卫生跳
	8	01135	刘凤兰	女	78	6	DX	颈椎正位	2019-04-15 10:08:53	2019-04-15 10:15:43	旱南县王由孜乡卫生跳
	9	01143	数正王	女	49	2	DX	胸部正位	2019-04-15 10:08:31	2019-04-15 10:17:00	阜南县王占孜乡卫生院
	10	3870	刘衍银	男	65	2	DX	胸部正位	2019-04-15 10:03:29	2019-04-15 10:05:25	阜南县赵缜慎卫生跳
	显示第 1 条到第 1)	9 祭记录 梅页显示	10 - 🕱	短录						< 1 2 3 4 5 212 >

可以进行图像的浏览操作

	1)22	00 2×1	88 282	ње ње		acabicata C	⊖ ≣≶			□ ₩₩	∡_ 魚度	0 875	O Es	し 注28時	ی انٹرین	⊳ ∦77886	Ð B	Ø sertende	◎ 漏》反執	() ()	() 410)		¥8466 ▲	33815e8f-b8	76 Q 🔻 1
DX 4个序列							e		8.5.8	1/8	DE 182 D	D to sh	iv he de	(स) ह)								可规	财政		
(a) 171.2									平阳分	十八八	医戊口	K国初广	化妆古	因八								8754	98		
ter ana a							摄体	相關 免費	医趾电子胶	月 影	像会	诊报告	单									8635.	屬性		
1							źt	£:	传光贺	拉	<i>9</i> 1: 3	ŋ	年 龄:	73								编号	24		居住
11	ſ						拉	查线式: [0X3878	たき はりもの	部位: 人	与新正位	检查目期:	2019-	04-15 14:5	4									
							-	NO-PERS	****	19-26 I. 10			TRAT											+ 01530 594	
100	1						杉	全查所。	见: 、气管后中	: 两侧 脉	外王常 ,	的间接增宽	; 两肺纹理	潜多潜机	素美技術									TOPPORT	
19.6								, 两中下 态在正常	歸野造完成 范围之内: 山田市市	潜張: 右. 以別編香:	上排野見 臣儀, 从	索条状及头	点状高官度 徒。	(彩: 心践 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	大小、9 5、1940年										
	3							未见钙化	周龙羽天, 彩, 秋间33	未见安牢.	-12 HE JUL 1	(MIC)(N)	x na 24., 1947	小村尺 足り	CI PRIMA									显示全部	
																						影響	f见(AI报告		
							,		~																
							右	全金印 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	张: 菅美、肺气	神红泉。												8/8	গজা (Abbath		
								16.03.26.17	жх.																
	X	0 Y: 0 Val:														Ĩ									
	Na	ame: ???																							
	M D	: 1/1 : 3878						2541	1112	84	sec. 7	112	44.91	či, 2019.	04-15 14:5										
	W	W: 255 WI					57		1995-10 PU	φ.1%.	- '' Y	えっかい	(无报告)	2. 例信床目	E:99参考1)	~									
totte	ф с	THE TIME.	3/4									版权所有802	018 安徽科大	讯飞速的	自己技术有限	公司								本产品分析的	国仅供医生参考

4、健康档案

【使用对象】

普通用户、申请医生、会诊医生

4.1、上传文件

7

点击健康档案出现3个子菜单,点击第一个子菜单上传文件,界面 展示用户需要上传的内容,将内容按格式依次填完后就可以保存提交

1 0				
		🤵 667 , IIgg -	🔎 🕞 ibutêr	倄 返回首页
个人中心				
团队管理	上传图像:	选择文件 未选择任何文件		
远程诊断 >	M-R -	3回应入64-25		
健康档案 ~	ALM -			
档案管理	\$990 :	●男 ○女		
上传文件	年龄:	调给入年龄		
我的教育	检查编号:	调输入检查编号		
	检查日期:	词称心入检查日期		
	检查模式:	の理想を入る時間		
	检查部位:	·斯法经	*	
	简要病史:			
	临床诊断:			
		82		
		and a		

4.2、我的数据

点击第二个子菜单我的数据,将展示用户上传后的内容,并以每页 10条的数据展示(可分页查看),或用户可以通过条件搜索来查询想要 的数据;在操作一栏,用户可以对某一条数据进行相关操作,如修改病 例,健康归档。

•	
	安徽影联云享医疗科技有限公司
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	育委员会

副 安裁省卫生和计划生育委员会 Ŭ:::::::: ピエル・ゴロ いいのたのたま 15									👩 你好,王振辉 🏼 🔎	🕞 退出登录 🛛 餐 返回首页
个人中心 > 团队管理 >	1986 : BRG		编号: 测输入患资编号	相知 王亡 :	调油样	部位:	请选择 * 上传时间:	#	查询	
远程诊断 > / / / / / / / / / / / / / / / / / /									M	18831969 (8881375)
档案管理	序号	康者编号	患者姓名	性别	年龄	模式	检查部位	國像数目	上传时间	检查时间
上传文件	1	L918014155	12	М	111	СТ	上肢	72	2019-3-28 01:11:46	2018-8-18
我的数据	2	L918009413	qîn yuan	М	066Y	СТ	脊柱	75	2019-3-28 02:55:53	2018-8-18
	3	16286	赵六	М	057Y	CT	biters 6	4	2019-3-28 04:30:00	2018-10-25
	4	16293	测试人员	F	22	СТ	M H谷谷	7	2019-4-01 04:23:51	2018-10-25
	Brits 1 44	masking outschage								
	显示第1条王	1頭 4 委记录,总共 4 委记录								

4.3、档案管理

当用户点击健康归档后,就可以在第三个子菜单档案管理中查看, 或用户以条件搜索来查询想要的档案;在操作一栏可做相关处理。

生和计划生育委员会 2 <u>4月6日</u> いてにおここ 時					🌸 (597 , 王振辉 🧔 🕞 退出登录 🌴 返				
> > E >	姓名: 谢翰入谢者姓名 书	·藏分类 · 动始平 · 检查时	н:	前 10 新加油店					
ur >	序号	姓名	档案分类	创建时间	操作				
圣 ~ 管理	1	王笑笑	識礙朋友	2019-3-28 01:08:22	優改				
文(牛	2	wang san ying	衰碱朋友	2019-3-28 01:18:34	修改				
勝过層	3	测试档案	我的墨書	2019-4-01 01:37:40	1984X				
	4	电路	亲戚朋友	2019-4-01 03:53:57	166-82C				
	5	测试人员	自己本人	2019-4-01 04:25:30	修政				
	6	测试人员1	我的康者	2019-4-01 04:28:03	1868X				
	7	w	父母子女	2019-4-01 07:09:48	相相改				
	8	ууу	自己本人	2019-4-01 07:14:25	修建改				
	显示第1条到第9条记录,总共96	和记录							

当用户点击新增档案时,将会跳转以下页面,用户可自行建立相关档案。



語 安徽省卫生和计划生育委员会 し::::::::							(🤵 的好,王振晖	ø	送出登录	倄 返回首页
个人中心 >	健康档案 / 档案管理 / 新建档案									***	
远程诊断 >											
NEURINERS ~	764 :										
档案管理	性别:	●男 ○女									
117×14	年龄:										
2010221	*档案分类:	自己本人						*			
	过敏史:										
	既往购史:										
	由了時以										
	чвтяхл										
	(参考) (参考)	18 M2	性别	律論	检查模式	检查部位	图像数日	操作			
				没有找到	匹配的记录						